


Instrukcja używania osłon w radiowizjografii, Rtg.

UWAGA! Osłony nie nadają się do sterylizacji w autoklawie.
Producent nie odpowiada za niezgodne z instrukcją
użycie osłon.

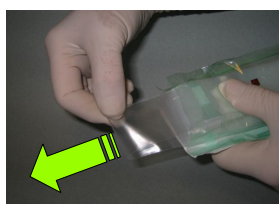


1) Opakowanie papierowo-foliowe w którym znajdują się osłony do Rtg
Należy otworzyć w miejscu zaznaczonym napisem "Tu otwierać".



2) .Wyjąć jedną osłonę i nałożyć na **wydezynfekowany** czujnik, zagryzak
lub trzymadełko dla klisz Rtg. Resztę osłon przechowywać w oryginalnym
opakowaniu w higienicznych warunkach. Stosowanie osłon nie zwalnia od
wymaganych przepisami czynności związanych z aseptyką narzędzi.



3) Wykonać zdjęcie Rtg

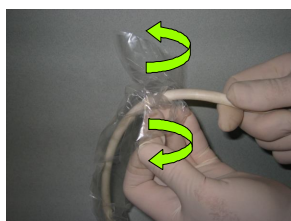

5) Po wykonaniu zdjęcia, osłonę należy zdjąć zawijając zainfekowaną
powierzchnią do wewnątrz.
Zużyte osłony na jedną godzinę umieścić w roztworze dezynfe-
kującym zalecanym przez SANEPID, następnie odesłać do utylizacji.
Czujnik poddać rutynowej dezynfekcji.

